

GUÍA PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN



VÍDEO DE ADMINISTRACIÓN

PLUMA PRECARGADA LISTA PARA USAR

No es necesario apretar ningún botón

Visor para ver bajar la dosis: solución clara de color amarillo

No use la pluma si la solución no está clara y contiene partículas.

Dispositivo de seguridad automático

Una cápsula de seguridad de color naranja oculta la aguja, evitando así pinchazos accidentales o su reutilización.

Aguja de inyección

La aguja no es visible en ningún momento.

Capuchón



1. ANTES DE LA INYECCIÓN

INSTRUCCIONES



1. Higiene

- Lávese las manos con agua caliente y jabón y séqueselas.



2. Posición


- Siéntese o recuéstese en una posición cómoda y relajada.
- Asegúrese de ver bien la zona en la que se va a inyectar.



3. Lugar de inyección

- Los posibles lugares de inyección son el abdomen y los muslos.
- Debe cambiar de zona de inyección cada vez que se inyecte.
- Limpie la zona donde se va a inyectar con la toallita que se le proporciona.

2. EN EL MOMENTO DE LA INYECCIÓN

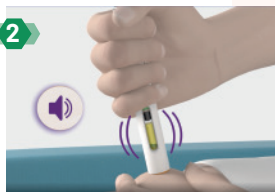

4. Preparación

- La pluma está precargada y lista para usar.
- Mientras sujeta la pluma precargada retire el capuchón de las manos.
- Mantenga la pluma en la mano y tenga cuidado para que no entre en contacto con nada, así se evitará una activación accidental.
- Mientras sujeta el cuerpo de la pluma, retire el tapón protector verde tirando de él suavemente y directamente hacia fuera de la unidad. No lo gire ni lo doble.

5. Inyección


- Haga un pliegue en su piel con un suave pellizco en el lugar de la inyección usando los dedos índice y pulgar y asegúrese de sujetar el pliegue durante la inyección.
- No hay que presionar ningún botón, simplemente sujete la pluma con las manos y coloque la cápsula amarilla de la aguja contra la zona de inyección, de tal modo que todo el borde de la cápsula de la aguja esté tocando la piel. **1**
- Presione la pluma preparada hacia abajo, contra la piel, hasta escuchar y sentir el primer clic. Esto activa la pluma precargada y hará que automáticamente se inyecte el medicamento. **2**
- La inyección dura un máximo de 10 segundos. Sentirá un segundo clic una vez que la inyección esté completada.
- Espere otros 2 o 3 segundos antes de retirar la pluma precargada de la piel. **3**
- La cápsula de protección de la pluma precargada ahora está bloqueada para prevenir cualquier lesión por pinchazo. Ahora puede soltar el pliegue de la piel.
- Inspeccione visualmente la pluma precargada a través de la ventana de visualización. Debería ver el plástico de color verde, esto significa que todo el medicamento ha sido inyectado. **4**

3. DESPUÉS DE LA INYECCIÓN



6. Eliminación

- Deseche la pluma precargada en un contenedor especial adecuado.
- En caso de contacto accidental del medicamento con la piel o los tejidos blandos, enjuague la zona con agua abundante.

Para un solo uso. Deseche cualquier resto de solución no utilizada. Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesite en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico como deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

CALENDARIO DE ADMINISTRACIÓN

DOSIS

PRÓXIMAS ANALÍTICAS

PRÓXIMAS CONSULTAS

/ /

/ /

/ /

/ /

MES:

Zona de administración:

L	M	X	J	V	S	D

MES:

Zona de administración:

L	M	X	J	V	S	D

MES:

Zona de administración:

L	M	X	J	V	S	D

MES: _____

Zona de administración:

L	M	X	J	V	S	D

MES: _____

Zona de administración:

L	M	X	J	V	S	D

MES: _____

Zona de administración:

L	M	X	J	V	S	D
